

PROCEDURE D'EXPORTATION EN DICOMDir

Télécharger un examen en DICOM afin de l'ouvrir dans un autre Viewer

Se connecter sur le PACS à l'aide des login et mot de passe habituels Pour activer l'exportation, il est nécessaire de renseigner son adresse mail dans le profil en cliquant sur le nom en haut à droite. Le champs est parfois vide



Une fenêtre s'ouvre

Entrer votre adresse mail dans le champs correspondant puis cliquer sur OK



1 - Depuis l'onglet EXPORTATION

2 - Rechercher l'examen à télécharger

3 - cocher la case à gauche de la ligne d'examen4 - cliquer sur Exporter vers DICOMDIR

	Glet	oal Ing _{Exe}	amens Pa	itients Exportation	1	GXD⁵P	acs			Œ		
	(Filtre	Filtre avar	ncé Ġ								
	Date :		Tous			Aujourd'hui						
			Les plus réc	ents		Hier						
	Compte Rendu :			÷ .	N	Aodalité :		0 0	÷.			
	Nom patient :		TEST	2	N	lom du médecin :					Reck	nercher
		Date	.	Nom patient		D	escription		ID patient	Acc. Numb.	Modalité	0
3	21	17/06/2015 19:26	5: 36	TEST_GREGOR	(ME	DULLAIRE		anonymousID 1434566707762	35168156	MR	
	_		Alterner la se	élection								1 6
				Exp	orter vers GXD5 CD	Exporter vers		4				10 série(s



TUTORIEL PACS

PROCEDURE D'EXPORTATION EN DICOMDir

Une fenêtre s'ouvre

Renommer l'exportation si nécessaire, sélectionner le format d'image et anonymiser les images au besoin puis cliquer sur OK.

Exportation		Utilisateur : test ()
Description:	TOF AVC	
Images:	DICOM DICOM lossless	DICOM natif
Anonymisation :		
Base du nom du patient :	•	
	29.25Mo	
Taille max de l'archive :	29.25 Mo	
OK	Cancel	

La fenêtre se ferme et un message de chargement s'affiche en bas de la page

Création de l'archive DICOMDIR_57238325582fa.zip en cours...

Un DICOMDIR est généré, cliquer sur le lien pour télécharger le fichier sur l'ordinateur

L'archive DICOMDIR est prête (57239ce839e97) https://

Décompresser l'archive afin d'obtenir le fichier DICOMDir à importer dans le Viewer tiers

/download.php?id=57239

Si le serveur de mail est configuré, un mail automatique vous sera envoyé sur l'adresse mail renseignée dans votre profil utilisateur une fois le téléchargement disponible.

> De : dicomdir@ Objet : [DICOMDIR] Exportation 2015-08-17 15:39:24 À : Kévin Peyre <k.peyre@global-imaging.net>

Cliquez sur le lien suivant pour télécharger le fichier: https:// DOMAINE //download.php?id=55d1e413c5502

Le fichier DICOMDIR_55d1e413c5502.zip sera gardé 5 jour(s) sur le serveur.

Cet e-mail a été généré automatiquement, veuillez ne pas y répondre.

Cliquer sur le lien présent dans le mail pour télécharger l'archive contenant les images. Importer le fichier DICOMDir dans le logiciel tiers pour afficher les images