## Importer un CD sur le pacs

## Intérêt de la fonctionnalité :

Importer les images contenues sur un CD et les intégrer dans un dossier patient existant

## Etapes à réaliser :

- 1- Vérifier ou réaliser l'accueil du patient sur le RIS
- 2- Ouvrir l'application GXD5 Diagnostics via l'icône



- 4- Cliquer sur le patient, l'examen ou la série à importer
- 5- Cliquer sur le bouton « Export »
- 6- Choisir la destination « PACS » dans « Intranet » et valider
- 7- Se connecter au pacs local (Pacs CIMO) via un navigateur WEB :
- 8- Cliquer sur l'onglet « Patient » et rechercher le dossier patient dans la liste à l'aide des champs de recherche.

Glebal				GLD <sup>®</sup> Pacs			
ımagıng	Exam	Patients   Recherche	Images reçues	Images envoyées   Bac à sable			
	( <b>4</b> m) =>	) Filtre Filtre avancé	G	Liste des exa			

9- Fusionner le patient récemment importé avec le dossier patient existant en cliquant sur l'icône « Déplacer les examens de ce patient vers un autre patient »

VisitID	Centre	-		-		_	C	2
	Global Imaging OnLine	0	<b>-</b> 25 🔁	ļ	🔽 🙀	<b>-</b>	2	•

10- Rechercher de nouveau le patient en entrant son nom dans le filtre de recherche

Deplacer cet examen									
Date	Nom pati	ent	ID patient	Acc. Num	b. Description	Modalité	Sexe	né(e) le	Centre
21/09/2017 08:11:00	ESCABASSE Thierr	y-Pierre	107428	50170	Arthroscanner du genou	SCANNER, AUTRE	м	1986-05-01	Global Imaging OnLine
				Vers le	patient				
DIAM4 PATIENT									
Nom *:		ESCABA	SSE		Prenom *:	l	Thierry	y-Pierre	
ID patient *:				Sexe *:			<b>T</b>		
né(e) le :(jj/mm/aaaa)					RECH	IERCHE			
							CREE	R NOUVE	AU PATIENT
(les champs * sont obligatoires pour creer un nouveau patient)									
	Nom patient	_	_	_	ID patient	_		né(e) le	Sexe
								0 patient p	our administrateur

11- Cliquer sur le dossier Patient trouvé en ayant bien vérifié le numéro « ID Patient » et confirmer la fusion en cliquant sur « Enregistrer »

Déplacer les examens du patient							
Nom : ID patient : né(e) le :		Prenom : Sexe :					
	Etes-vous sûr de vouloir déplacer I Nom: annay Prenom: Sexe: M né(e) le: 12/100 ID patient: annay Enregistrer	es examens dans le patient suivant: Immeri 4 (83:19542708) 1974 Immeri 10 143831 (9382709) Cancel					

