



PROCEDURE DE RECONCILIATION V2 & V3 hors BAS

 **Le Poumon n'apparaît pas dans la liste du jour du RIS** 
Mémoriser l'identifiant Patient
Copier/coller le numéro de dossier à partir de l'onglet Général

Se connecter sur le PACS local
 Rechercher le patient correspondant
 Si l'id Patient est correct, passer directement à la 2^{ème} étape

ETAPE 1 : Réconciliation Patient

ID patient	Nom patient	né(e) le	Acc. Numb.	Description	Modalité	Médecin	Centre
20160425-01-0005	MONIQUE	09/04/1946		Coude	RADIOGRAPHIE		

Cliquer sur l'icône tout à droite (Déplacer cet examen vers un autre patient)

26/04/2016 16:40:06 20160426.163959. 20160426.163959. ULTRASONS O CLINIQUE de CHENOVE

Vers le patient
DIAM4 PATIENT

Nom *: Prenom *:
 ID patient *: Sexe *:
 né(e) le : (jj/mm/aaaa)

(les champs * sont obligatoires pour creer un nouveau patient)

Nom patient	ID patient	né(e) le	Sexe
TEST Radio	33.825380	01/01/1980	M

Une fenêtre s'ouvre : Rechercher le patient avec l'ID du RIS dans la liste inférieure
ASTUCE : Mettre les 3 premières lettres du nom et du prénom en cas d'erreur de saisie manuelle

Êtes-vous sûr de vouloir déplacer cet examen dans le patient suivant:

Nom: **TEST**
 Prenom: **Radio**
 Sexe: **M**
 né(e) le: **01/01/1980**
 ID patient: **33.825380**

Une fois le bon patient retrouvé, cliquer dessus.
 Contrôler les informations du patient sélectionné et enregistrer

PROCEDURE DE RECONCILIATION V2 & V3 hors BAS

ETAPE 2 : Réconciliation Dossier

A partir du PACS local, rechercher le patient correspondant

nom patient	né(e) le	Acc. Numb.	Description	Modalité	Médecin	Centre
Romain	16/09/1996		Cervical	RADIOGRAPHIE		

Repérer et entrer dans le dossier du patient

Cervical			27/04/2016 19:16:20	RADIOGRAPHIE	2	
Radiographie du rachis cervical selon 3 instances ou plus	33 477103		27/04/2016 18:36:39	LORENZ...	0	

Cliquer sur le dossier avec le crayon dans les icones de droites pour éditer le n° de dossier

Numéro de dossier : 33.XXXXXX

Description : Cervical

Radiologue :

Correspondant :

Anatomie : CSPINE

Pathologie :

StudyInstanceUID : 1.3.46.670589.30.1.6.1

Description détaillée de l'examen :

Enregistrer Annuler

Coller le numéro de dossier dans le champs correspondant puis enregistrer



Rafraichir la liste du jour dans le RIS pour faire apparaître le poumon



Icônes utiles



De Gauche à droite,
Informations / Export d'image / Modification patient



Icône Informations activée / Icône Export d'image désactivée
Correspond à un RDV du RIS sans image dans le dossier



Icône Informations désactivée / Icône Export d'image activée
Correspond à un dossier Image seul sans information administratives

Un examen est correctement réconcilié lorsque les deux icones sont bleues