UTILISATION DU BAC A SABLE

Intérêt de la fonctionnalité :

- Pouvoir rattacher des images à un dossier patient crée à posteriori (panne RIS, prise du patient en urgence sans accueil).

Etapes à réaliser :

- 1- Vérifier ou réaliser l'accueil du patient sur le RIS
- 2- Se connecter au pacs via un navigateur :
 - a. Adresse du PACS PONT DE SEVRES : http://192.168.101.204/login_auto.php
 - b. Adresse du PACS MARCEL SEMBAT : http://192.168.1.204/login_auto.php
 - c. Identifiant / Mot de passe : autouser / user
- 3- Cliquez sur « bac à sable »:



4- Rechercher le dossier image du patient dans la liste à l'aide des champs de recherche, le sélectionner et cliquer sur « réconcilier » :



5- Dans cette fenêtre, repérer le dossier patient récemment crée sur le RIS, le sélectionner et cliquez sur « Intégrer au PACS avec l'examen choisi » :



6- Une fenêtre récapitulative apparait, bien vérifier les éléments et confirmez :

